


Shandon PapSpin™

Protocol voor het verwerven van gynaecologische monsters

- 1 Label het PapSpin Collection Vial (verzamel flesje) met de juiste patiëntidentificatie.
- 2 Verwijder de dop van het flesje PapSpin Collection Fluid en zet het open flesje op een tafel dicht bij u in de buurt.
- 3 Steek het speculum naar binnen **zonder glijmiddel te gebruiken**.
- 4 Breng de PAPETTE™ brush in contact met de cervix en steek de haartjes in het midden in het cervicale kanaal, diep genoeg om de korte haartjes volledig in contact te brengen met de ectocervix. (Zie het diagram).

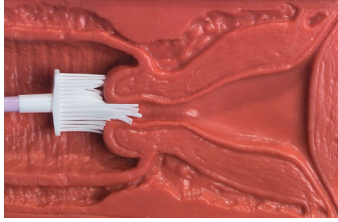

- 5 Terwijl u zacht blijft drukken in de richting van de cervix, draait u het borsteltje 5 keer met de klok mee. Haal de PAPETTE™ brush eruit.



HOUD DE PAPETTE™ BRUSH NIET OMLAAG.

- 6 Gebruik een pincet of gehandschoeide vingers om het witte borstelige uiteinde van de PAPETTE™ brush van de handgreep los te maken en in het flesje PapSpin Collection Fluid te laten vallen.



STEL DEZE STAP OM GEEN ENKELE REDEN UIT.

- 7 Plaats de dop terug op het flesje en zorg ervoor dat deze stevig aangedraaid is. Schud het flesje en prepareer het voor transport.

Behandelen en bewaren van de PapSpin Collection Fluid

Behandelen: Houd flacons gesloten wanneer u ze niet gebruikt. Draag beschermende handschoenen en een spatvrije bril wanneer u deze vloeistof hanteert. Een waterdicht schort wordt eveneens aanbevolen als beschermingsmaatregel. Vermijd elk contact met de huid en de ogen. Trek besmette kleding na morsen meteen uit.

Bewaren: Bewaar het product in een brandvrije opslagkast. Houd het product verwijderd van warmte, vonken en open vlammen.

Thermo

ELECTRON CORPORATION

Thermo Electron Corporation
Anatomical Pathology
Clinical Diagnostics
Postbus 5705
Taakebijsters 1
4817 BL, Breda, Nederland
Tel: + 31 076.587.9888
Fax: +31 076.581.2028
www.thermo.com/shandon

Voor bijbestellingen van de Shandon PapSpin: bestel onderdeelnummer A78710006 bij uw plaatselijke leverancier.

Thermo Electron Corporation
Anatomical Pathology
Clinical Diagnostics
Rue Defacqz 63 Defacqstraat
Bruxelles 1060 Brussel
Belgique - België
Tel: +32 02.538.8767
Fax: +32 02.538.1574
www.thermo.com/shandon