

Aufzeichnung über die tägliche Wartung für Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Monat: _____

Seriennummer: _____

Tägliche Wartung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Benutzeranmeldung																															
Behälter für entionisiertes Wasser prüfen																															
Abwasserbehälter prüfen																															
Küvettenabfallbox prüfen																															
Küvettenladestation nachfüllen																															
ISE Cal1-Beutel prüfen																															
Reagenzstatus prüfen																															
Startup durchführen (Grundbildschirm – F1-Startup)																															
Standby durchführen (Grundbildschirm – F2-Standby)																															
Tagesdaten löschen (Grundbildschirm – F8/F3/F7)																															
Segmente entfernen (Grundbildschirm - Probensteller - F5)																															
Cal/QC-Cups entfernen																															
Nadeln/Rührschaufel(n) reinigen F8/F2/F8/F4																															
Waschgefäße reinigen																															
Nadel-/Mixerposition prüfen F8/F2/F5																															
Oberflächen reinigen (mit feuchtem Tuch)																															
Abmelden																															
Initialen des Benutzers																															

Unterschrift des Laborleiters _____

Aufzeichnung über die wöchentliche Wartung für Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Monat: _____

Seriennummer: _____

Wöchentliche Wartung	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5
Behälter für entionisiertes Wasser und Abwasser spülen					
Referenzelektrodenlösung prüfen					
Probensegmente reinigen					
Proben-/Reagenzteller reinigen					
Kondensiertes Wasser unter dem Reagenzteller (alle Modelle) und unter dem Probenteller (PRIME-Modelle) abwischen					
Workstation starten					
Initialen des Benutzers					

Unterschrift des Laborleiters _____

Aufzeichnung über die monatliche Wartung für Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Jahr: _____

Seriennummer: _____

Monatliche Wartung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schläuche (Leitungen) mit im Verhältnis 1:4 verdünnter Waschlösung (4,5 %) spülen												
ISE-Schläuche mit Waschlösung (4,5 %) spülen												
Kumulative QK-Auswertungen Test für Test ausdrucken (Grundbildschirm – F8/F1/F5)												
Datenbank speichern (Grundbildschirm – F8/F3/F3)												
Initialen des Benutzers												

Unterschrift des Laborleiters _____