

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Enregistrement de maintenance quotidienne

Mois : _____

N° de série : _____

| Maintenance quotidienne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Connexion utilisateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier le conteneur d'eau déionisée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier le conteneur des eaux usées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier le compartiment déchets cuvette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajouter des cuvettes au chargeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier le sac Cal ISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier l'état des réactifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectuer le démarrage (Ecran principal - F1-Démarrage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectuer le standby (Ecran principal – F2- Standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effacer les fichiers quotidiens (Ecran principal – F8/F3/F7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retirer les segments (Ecran principal-Disque échantillon- F5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retirer les coupelles Cal/QC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyer le(s) lame(s) de mélange/aiguilles F8/F2/F8/F4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyer les puits de lavage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérifier la position du mélangeur/aiguille F8/F2/F5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyer les surfaces (avec un tissu humide) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déconnexion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Initiales de l'opérateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature du superviseur _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Enregistrement de maintenance hebdomadaire**Mois :** _____**N° de série :** _____

| Maintenance hebdomadaire | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoyer les conteneurs d'eau déionisée et d'eaux usées | | | | | |
| Vérifier la solution d'électrode de référence | | | | | |
| Nettoyer les segments échantillons | | | | | |
| Nettoyer le disque d'échantillon/réactif | | | | | |
| Enlever l'eau condensée sous le disque de réactif (tous les modèles) et sous le disque d'échantillon (modèles PRIME) | | | | | |
| Démarrer la station de travail | | | | | |
| Initiales de l'opérateur | | | | | |

Signature du superviseur _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Enregistrement de maintenance mensuelle

Année : _____

N° de série : _____

| Maintenance mensuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoyer les tubes (lignes) avec une solution de lavage 1 + 4 diluée 4.5% | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyer les tuyaux ISE avec une solution de lavage 4.5% | | | | | | | | | | | | |
| Imprimer le cumul QC essai par essai (Ecran principal – F8/F1/F5) | | | | | | | | | | | | |
| Enregistrer la base de données (Ecran principal – F8/F3/F3) | | | | | | | | | | | | |
| Initiales de l'opérateur | | | | | | | | | | | | |

Signature du superviseur _____