

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 registrering af daglig vedligeholdelse

Måned: _____

Serienummer: _____

Daglig vedligeholdelse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bruger-login																															
Kontrol af beholder til afioniseret vand																															
Kontrol af spildevandsbeholder																															
Kontrol af cuvettens affaldsrum																															
Tilføjelse af cuvetter til loaderen																															
Kontrol af ISE Cal1-posen																															
Kontrol af reagensets status																															
Udførelse af opstart (Hovedskærm – F1-Opstart)																															
Udførelse af standby (Hovedskærm – F2-Standby)																															
Rydning af daglige filer (Main screen – F8/F3/F7)																															
Fjernelse af segmenter (Hovedskærm - Prøvedisk- F5)																															
R Fjernelse af kal/kvalitetskontrol-kopper																															
Rengøring af kanyler/blandepind(e) F8/F2/F8/F4																															
Rengøring af vaskebrønde																															
Kontrol af kanyler/blandeposition F8/F2/F5																															
Rengøring af overflader (med en våd serviet)																															
Logoff																															
Operatorørens initialer																															

Supervisorens underskrift _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 registrering af ugentlig vedligeholdelse

Måned: _____

Serienummer: _____

Ugentlig vedligeholdelse	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5
Vask af beholder til afioniseret vand og spildevand					
Kontrol af referenceelektrode-opløsningen					
Rengøring af prøvesegmenter					
Rengøring af prøve- og reagensdisk					
Aftørring af kondensvand under reagensdisken (alle modeller) og under prøvedisken (PRIME-modeller)					
Genstart af arbejdsstationen					
Operatorørens initialer					

Supervisorens underskrift _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 registrering af månedlig vedligeholdelse

År: _____

Serienummer: _____

Månedlig vedligeholdelse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vask af slanger med et vaskemiddel 4,5 % fortyndet i forholdet 1:41												
Vask af ISE-slanger med et vaskemiddel 4,5 %												
Udskrivning af kvalitetskontrol-akkumulativer test for test (Hovedskærm – F8/F1/F5)												
Lagring af databasen (Hovedskærm – F8/F3/F3)												
Operatorørens initialer												

Supervisorens underskrift _____