

Protokol denní údržby pro přístroje Konelab 20, 20XT, PRIME 30 a PRIME 60

Měsíc: _____

Sériové č. _____

Denní údržba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Přihlášení uživatele																															
Kontrola nádoby na deionizovanou vodu																															
Kontrola nádoby na odpadní vodu																															
Kontrola nádoby na odpadní květy																															
Založení květ do zakladače																															
Kontrola sáčku ISE CAL1																															
Kontrola stavu reagentie																															
Spuštění (Hlavní obrazovka – F1-Spuštění)																															
Přechod do pohotovostního režimu (Hlavní obrazovka – F2-Pohotovostní režim)																															
Smazání denních souborů (Hlavní obrazovka – F8/F3/F7)																															
Vyjmutí segmentů: (Hlavní obrazovka – Kotouč vzorků – F5)																															
Vyjmutí misek pro Kal/QC																															
Čisté jehly/směšovací lopatky F8/F2/F8/F4																															
Vyčištění mycích šachet																															
Kontrola polohy jehly/směšovače F8/F2/F5																															
Očištění ploch (vlhkou látkou)																															
Odhlášení																															
Iniciály obsluhy																															

Podpis nadřízeného _____

Protokol týdenní údržby pro přístroje Konelab 20, 20XT, PRIME 30 a PRIME 60

Měsíc: _____

Sériové č. _____

Týdenní údržba	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
Umytí nádob na deionizovanou a odpadní vodu					
Kontrola roztoku referenční elektrody					
Očištění vzorkových segmentů					
Očištění vzorkového a reagenčního kotouče					
Otření zkondenzované vody pod reagenčním kotoučem (všechny modely) a pod kotoučem vzorků (modely PRIME)					
Spuštění pracovní stanice					
Iniciály obsluhy					

Podpis nadřízeného _____

Protokol měsíční údržby pro přístroje Konelab 20, 20XT, PRIME 30 a PRIME 60

Rok: _____

Sériové č. _____

Měsíční údržba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Promytí hadiček (linek) 4,5% promývacím roztokem naředěným v poměru 1+4												
Promytí hadiček ISE 4,5% promývacím roztokem												
Vyčištění hromadných QC měření po jednotlivých testech (Hlavní obrazovka – F8/F1/F5)												
Uložení databáze (Hlavní obrazovka – F8/F3/F3)												
Iniciály obsluhy												

Podpis nadřízeného _____