

Αρχείο καθημερινής συντήρησης Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Μήνας: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Καθημερινή συντήρηση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Σύνδεση χρήστη																															
Έλεγχος του δοχείου αποιονισμένου νερού																															
Έλεγχος του δοχείου υγρών αποβλήτων																															
Έλεγχος διαμερίσματος απορριμμάτων κυψελίδας																															
Προσθήκη κυψελίδων στον φορτωτή																															
Έλεγχος σακούλας ISE Cal1																															
Έλεγχος κατάστασης αντιδραστηρίου																															
Πραγματοποίηση έναρξης (Κύρια οθόνη - Έναρξη-F1)																															
Πραγματοποίηση αναμονής (Κύρια οθόνη - Αναμονή-F2)																															
Απαλοιφή καθημερινών αρχείων (Κύρια οθόνη - F8/F3/F7)																															
Κατάργηση δειγμάτων (Κύρια οθόνη - Δίσκος δείγματος -F5)																															
Αφαίρεση καψιδίων Cal/QC																															
Καθαρισμός βελόνων /πτερυγίου(ων) ανάμιξης F8/F2/F8/F4																															
Καθαρισμός φρεατίων																															
Έλεγχος της θέσης της βελόνας/ανάμικτη F8/F2/F5																															
Καθαρισμός επιφανειών (με ένα υγρό χαρτομάντηλο)																															
Αποσύνδεση																															
Αρχικά χειριστή																															

Υπογραφή επιτηρητή _____

Αρχείο εβδομαδιαίας συντήρησης Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Μήνας: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Εβδομαδιαία συντήρηση	1^η εβδομάδα	2^η εβδομάδα	3^η εβδομάδα	4^η εβδομάδα	5^η εβδομάδα
Πλύσιμο δοχείων απιονισμένου νερού και υγρών αποβλήτων					
Έλεγχος διαλύματος ηλεκτροδίων αναφοράς					
Καθαρισμός τμημάτων δείγματος					
Καθαρισμός δίσκου δείγματος/αντιδραστηρίου					
Σκούπισμα συμπυκνωμάτων νερού κάτω από τον δίσκο αντιδραστηρίου (όλα τα μοντέλα) και κάτω από τον δίσκο δείγματος (μοντέλα PRIME)					
Εκκίνηση του σταθμού εργασίας					
Αρχικά χειριστή					

Υπογραφή επιτηρητή _____

Αρχείο μηνιαίας συντήρησης Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Έτος: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Μηνιαία συντήρηση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Πλύσιμο σωλήνων (γραμμών) με αραιωμένο 1+4 διάλυμα έκπλυσης 4,5%												
Πλύσιμο σωλήνωσης ISE με διάλυμα έκπλυσης 4,5%												
Εκτύπωση συγκεντρωτικών QC (ποιοτικών ελέγχων) ανά δοκιμή (Κύρια οθόνη – F8/F1/F5)												
Αποθήκευση της βάσης δεδομένων (Κύρια οθόνη – F8/F3/F3)												
Αρχικά χειριστή												

Υπογραφή επιτηρητή _____