

Registro de Mantenimiento Diario de Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mes: _____ N°. de Serie: _____

Mantenimiento Diario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Inicio de Sesión del Usuario																															
Verificar Contenedor de Agua Desionizada																															
Verificar Contenedor de Aguas Residuales																															
Verificar Compartimento de Residuos de Cubetas																															
Agregar Cubetas al Cargador																															
Verificar bolsa ISE Cal1																															
Verificar Estado de Reactivos																															
Realizar Arranque (Pantalla principal - F1-Arranque)																															
Activar Modo de Reserva (Pantalla principal - F2-Reserva)																															
Borrar Archivos Diarios (Pantalla principal - F8/F3/F7)																															
Eliminar Segmentos (Pantalla Principal - Disco de muestra - F5)																															
Eliminar copas Cal/QC																															
Limpiar Agujas/Paleta(s) de Mezclado F8/F2/F8/F4																															
Limpiar Pocillos de Lavado																															
Verificar posición de Aguja/Mezclador F8/F2/F5																															
Limpiar Superficies (con un papel tisú humedecido)																															
Cerrar Sesión																															
Iniciales del Operador																															

Firma del Supervisor _____

Registro de Mantenimiento Semanal de Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mes: _____

Nº. de Serie: _____

Mantenimiento Semanal	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Lavar Contenedores de Agua Desionizada y Aguas Residuales					
Verificar la Solución de Electrodo de Referencia					
Limpia Segmentos de Muestra					
Limpia Disco de Muestras/Reactivos					
Retirar el agua condensada debajo del disco de reactivos (todos los modelos) y debajo del disco de muestras (modelos PRIME)					
Reiniciar la Estación de Trabajo					
Iniciales del Operador					

Firma del Supervisor _____

Registro de Mantenimiento Mensual de Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Año: _____

Nº. de Serie: _____

Mantenimiento Mensual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lavar Tubos (Líneas) con Solución de Lavado 1+4 diluida 4,5%												
Lavar tubos ISE con Solución de Lavado 4,5%												
Imprimir QC acumulativos prueba por prueba (Pantalla principal - F8/F1/F5)												
Guardar Base de Datos (Pantalla principal - F8/F3/F3)												
Iniciales del Operador												

Firma del Supervisor _____