

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 päivittäiset toimet

Kuukausi: _____

Sarjanro #: _____

Päivittäinen ylläpito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Login																															
Tarkista puhdasvesiastia																															
Tarkista jätevesiastia																															
Tarkista kyvettien jäteastia																															
Lisää kyvettejä																															
Tarkista ISE Cal1 pussi																															
Tarkista reagenssien tilanne																															
Suorita Startup (Päävalikko – F1-Startup)																															
Suorita Standby (Päävalikko – F2-Standby)																															
Tietojen poisto (Päävalikko – F8/F3/F7)																															
Poista segmentit (Päävalikko- Näytekiekko- F5)																															
Poista Cal/QC kupit																															
Puhdista annosteluneulat/ sekoittimet F8/F2/F8/F4																															
Puhdista pesukaivot																															
Tarkista annosteluneulojen/ sekoittimien paikat F8/F2/F5																															
Puhdista laitteen pinnat (kostealla pyyhkeellä)																															
Logoff																															
Käyttäjän nimikirjaimet																															

Esimiehen allekirjoitus _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 viikottaiset toimet

Kuukausi: _____

Sarjanro #: _____

Viikottainen ylläpito	Viikko 1	Viikko 2	Viikko 3	Viikko 4	Viikko 5
Pese puhdasvesi- ja jätevesiastiat					
Tarkista referenssielektrodin liuos					
Puhdista näytsegmentit					
Puhdista näyte-/ reagenssikiekk					
Kuivaa reagenssikiekkon alle kondensoitunut vesi (kaikki laitemallit) ja näytekiekkon alle kondensoitunut vesi (PRIME mallit)					
Boottaa työasema					
Käyttäjän nimikirjaimet					

Esimiehen allekirjoitus _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 kuukausittaiset toimet

Vuosi: _____

Sarjanro #: _____

Kuukausittainen ylläpito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pese letkut 1+4 laimennetulla Washing Solution 4.5% -liuoksella												
Pese ISE-letkut Washing Solution 4.5% -liuoksella												
Tulosta kumulatiiviset QC tulokset testeittäin (Päävalikko – F8/F1/F5)												
Tallenna tietokanta (Päävalikko – F8/F3/F3)												
Käyttäjän nimikirjaimet												

Esimiehen allekirjoitus _____