

## Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 igapäevase hoolduse registreerimine

Kuu: \_\_\_\_\_

Seerianr: \_\_\_\_\_

Igapäevane hooldus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kasutaja login																															
Deioniseeritud vee paagi kontrollimine																															
Heitvee paagi kontrollimine																															
Küveti jäätmesahtli kontrollimine																															
Küvettide lisamine laadurisse																															
ISE Cal1 koti kontrollimine																															
Reaktiivi oleku kontrollimine																															
Käivitamise kontrollimine (põhikuva – F1-käivitamine)																															
Ooterežiimi kontrollimine (põhikuva – F2-käivitamine)																															
Igapäevaste failide kustutamine (põhikuva – F8/F3/F7)																															
Segmentide eemaldamine (põhikuva- proovide ketas- F5)																															
Cal/QC topside eemaldamine																															
Nõelte/segamisspaatli(te) puhastamine F8/F2/F8/F4																															
Pesemissüvikute puhastamine																															
Nõela/mikseri positsiooni kontrollimine F8/F2/F5																															
Pindade puhastamine (niiske lapiga)																															
Väljalogimine																															
<b>Operaatori nimetähed</b>																															

Kontrollija allkiri \_\_\_\_\_

**Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 iganädalase hoolduse registreerimine****Kuu:** \_\_\_\_\_**Seerianr:** \_\_\_\_\_

<b>Iganädalane hooldus</b>	<b>1. nädal</b>	<b>2. nädal</b>	<b>3. nädal</b>	<b>4. nädal</b>	<b>5. nädal</b>
Deioniseeritud vee ja heitvee paakide pesemine					
Referentselektroodi lahuse kontrollimine					
Proovisegmentide puhastamine					
Proovi/reaktiivi ketta puhastamine					
Kondensvee ärapühkimine reaktiivi ketta alt (kõik mudelid) ja prooviketta alt (PRIME-mudelid)					
Tööjaama käivitamine					
<b>Operaatori nimetähed</b>					

**Kontrollija allkiri** \_\_\_\_\_

**Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 igakuise hoolduse registreerimine**

Aasta: \_\_\_\_\_

Seerianr: \_\_\_\_\_

<b>Igakuine hooldus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Katsutite (liinid) pesemine 1+4 lahjendatud 4,5% pesulahusega												
ISE-katsutite pesemine 4,5% pesulahusega												
QC-kumulatiivtesti prooviprintimine (põhikuva – i8vi1ta5mine)												
Andmebaasi salvestamine (põhikuva – i8vi3ta3mine)												
<b>Operaatori nimetähed</b>												

Kontrollija allkiri \_\_\_\_\_