

Napi karbantartási jegyzőkönyv a Konelab 20, 20XT, PRIME 30 és PRIME 60 készülékekhez

Hónap: _____

Sorozatszám: _____

Napi karbantartás	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Felhasználói bejelentkezés																															
Az ionmentes víztartály ellenőrzése																															
A szennyvíztartály ellenőrzése																															
A küvettaledobó-tartály ellenőrzése																															
A küvetták küvettatöltőbe helyezése																															
Az ISE Cal1 tasak ellenőrzése																															
A reagens állapotának ellenőrzése																															
Rendszerindítás végzése (Főablak – F1-Startup)																															
Készenléti állapotba helyezés (Főablak – F2-Standby)																															
A napi fájlok törlése (Főablak – F8/F3/F7)																															
A szegmensek eltávolítása (Főablak- Sample disk- F5)																															
A kal/QC kelyhek eltávolítása																															
A tűk és keverőlapát(ok) tisztítása F8/F2/F8/F4																															
A mosókutak tisztítása																															
A tűk és keverők pozíciójának ellenőrzése F8/F2/F5																															
A felületek tisztítása (egy nedves szövetdarabbal)																															
Kijelentkezés																															
A kezelő monogramja:																															

Az ellenőrző személy aláírása: _____

Heti karbantartási jegyzőkönyv a Konelab 20, 20XT, PRIME 30 és PRIME 60 készülékekhez

Hónap: _____

Sorozatszám: _____

Heti karbantartás	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét
Az ionmentes és szennyvíztartályok mosása					
A referenciaelektrod-oldat ellenőrzése					
A mintaszegmensek tisztítása					
A minta- és reagenslemez tisztítása					
A reagenslemez (minden készülékfajta esetén) és a mintalemez (a PRIME készülékeknél) alatti kondenzált víz letörölése					
A munkaállomás újraindítása					
A kezelő monogramja:					

Az ellenőrző személy aláírása: _____

Havi karbantartási jegyzőkönyv a Konelab 20, 20XT, PRIME 30 és PRIME 60 készülékekhez

Év: _____

Sorozatszám: _____

Havi karbantartás	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A csövek mosása 4,5%-os hígított (1:5) mosóoldattal												
Az ISE csövek mosása 4,5%-os mosóoldattal												
A kumulatív QC adatok nyomtatása vizsgálatonként (Főablak – F8/F1/F5)												
Az adatbázis elmentése (Főablak – F8/F3/F3)												
A kezelő monogramja:												

Az ellenőrző személy aláírása: _____