

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Kasdieninės techninės priežiūros įrašas

Mėnuo: _____

Serijos numeris: _____

Kasdieninė techninė priežiūra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vartotojo prisijungimas																															
Patikrinti dejonizuoto vandens baką																															
Patikrinti nutekamojo vandens baką																															
Patikrinti kiuvetės atliekų dėžę																															
Pridėti kiuvetes į dėklą																															
Patikrinti ISE Cal1 maišelį																															
Patikrinti reagento būseną																															
Atlikti pradžios funkcijos patikrinimą (Pagrindinis ekranas – F1 - pradžia)																															
Atlikti pristabdymo funkcijos patikrinimą (Pagrindinis ekranas – F2 – pristabdymo funkcija)																															
Ištrinti per dieną susikaupusias rinkmenas (Pagrindinis ekranas – F8/F3/F7)																															
Pašalinti segmentus (Pagrindinis ekranas-Mėginio diskas- F5)																															
Pašalinti Cal/QC indelius																															
Nuvalyti adatas/maišymo menteles F8/F2/F8/F4																															
Nuvalyti plovimo vietas																															
Patikrinti adatos/maišytuvo padėtį F8/F2/F5																															
Nuvalyti paviršius (šlapiu audeklo gabalėliu)																															
Atsijungimas																															
Operatoriaus inicialai																															

Pržiūrėtojo parašas _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 savaitinės techninės priežiūros įrašas

Mėnuo: _____

Serijos numeris: _____

Savaitinė techninė priežiūra	1-a savaitė	2-a savaitė	3-a savaitė	4-a savaitė	5-a savaitė
Išplauti dejonizuoto ir nutekamo vandens bakus					
Patikrinti elektrodo tirpalą					
Nuvalyti mėginių segmentus					
Nuvalyti mėginių/reagentų diską					
Nuvalyti po reagento disku (visuose modeliuose) ir po mėginio disku („PRIME" modeliuose) susikaupusį vandenį					
Paleisti darbo stotelę					
Operatoriaus inicialai					

Prižiūrėtojo parašas _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Mėnesinės techninės priežiūros įrašas**Metai:** _____**Serijos numeris:** _____

Mėnesinė techninė priežiūra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Išplauti vamzdelius skiestu 1+4 4,5% plovimo tirpalu												
Išplauti ISE vamzdelius 4,5% plovimo tirpalu												
Atspausdinti QC kumuliacinius testus (Pagrindinis ekranas – F8/F1/F5)												
Išsaugoti duomenų bazę (Pagrindinis ekranas – F8/F3/F3)												
Operatoriaus inicialai												

Prižiūrėtojo parašas _____