

**“Konelab 20”, “20XT”, “PRIME 30”, “PRIME 60” ikdienas apkopes atskaite**

Mēnesis: \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. : \_\_\_\_\_

Ikdienas apkope	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lietotājevārds																															
Dejonizētā ūdens konteineru pārbaude																															
Notekūdens konteineru pārbaude																															
Kivetes pārpalikumu nodalījuma pārbaude																															
Kivešu pievienošana pie iekrāvēja																															
“ISE Cal1” somas pārbaude																															
Reaģenta statusa pārbaude																															
Ieslēgšana (galvenais ekrāns – F1 – ieslēgšana)																															
Dīkstāve (galvenais ekrāns – F2 – dīkstāve)																															
Ikdienas datņu dzēšana (galvenais ekrāns – F8/F3/F7)																															
Segmentu noņemšana (galvenais ekrāns – parauga disks – F5)																															
Cal/QC kausiņu noņemšana																															
Adatu/maisīšanas lāpstiņas (-u) tīrīšana (F8/F2/F8/F4)																															
Mazgāšanas nodalījuma tīrīšana																															
Adatas/maisītāja stāvokļa pārbaude (F8/F2/F5)																															
Virsmu tīrīšana (ar mitru lupatiņu)																															
Atteikšanās																															
<b>Operatora iniciāļi</b>																															

**Uzrauga paraksts** \_\_\_\_\_

**“Konelab 20”, “20XT”, “PRIME 30”, “PRIME 60” iknedçd’as apkopes atskaite**

**Mçnesis:** \_\_\_\_\_

**Sçrijas Nr. :** \_\_\_\_\_

<b>Iknedçd’as apkope</b>	<b>1. nedçd’a</b>	<b>2. nedçd’a</b>	<b>3. nedçd’a</b>	<b>4. nedçd’a</b>	<b>5. nedçd’a</b>
Dejonizçtâ ūdens un notekūdens konteineru mazgāšana					
Atsauces elektrodu dīidruma pārbaude					
Parauga segmentu tīrīšana					
Parauga/reaēenta diska tīrīšana					
Kondensçtâ ūdens noslaucīšana zem reaēenta diska (visi modeļi) un zem parauga diska (“PRIME” modeļi)					
Darbstacijas sāknçšana					
<b>Operatora iniciād’i</b>					

**Uzrauga paraksts** \_\_\_\_\_

**“Konelab 20”, “20XT”, “PRIME 30”, “PRIME 60” ikmēdņa apkopes atskaite**

Gads: \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. : \_\_\_\_\_

<b>Ikmēdņa apkope</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Cauružu (līniju) mazgāšana ar atdāidītu 1+4 4,5% mazgāšanas dīdumu												
ISE cauružu sistēmas mazgāšana ar 4,5% mazgāšanas dīdumu												
QC kumulatīvā testa izdruka (galvenais ekrāns – F8/F1/F5)												
Datubāzes saglabāšana (galvenais ekrāns – F8/F3/F3)												
<b>Operatora iniciādi</b>												

Uzrauga paraksts \_\_\_\_\_