

Registo de Manutenção Diária do Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mês: _____

N.º de série: _____

Manutenção Diária	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Login do Utilizador																																		
Verificar o depósito de água desionizada																																		
Verificar o depósito de águas residuais																																		
Verificar o compartimento de resíduos de cuvetes																																		
Adicionar cuvetes no alimentador																																		
Verificar o saco de ISE Cal1																																		
Verificar o estado do reagente																																		
Executar a inicialização (ecrã principal – F1 Inicialização)																																		
Executar Standby (ecrã principal – F2 Standby)																																		
Limpar ficheiros diários (ecrã principal – F8/F3/F7)																																		
Remover segmentos (ecrã principal –disco de amostras F5)																																		
Remover os recipientes de Cal/QC																																		
Limpar agulhas/pá(s) misturadora(s) F8/F2/F8/F4																																		
Lavar os poços																																		
Verificar a posição da agulha/misturador F8/F2/F5																																		
Limpar as superfícies (com um pano molhado)																																		
Sair de sessão																																		
Iniciais do operador																																		

Assinatura do Supervisor _____

Registo de Manutenção Semanal do Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mês: _____

N.º de série: _____

Manutenção semanal	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Lavar os depósitos de água desionizada e residual					
Verificar a solução de eléctrodo de referência					
Limpar os segmentos de amostra					
Limpar o disco de amostra/reagente					
Limpar a água condensada por baixo do disco de reagente (todos os modelos) e por baixo do disco de amostra (modelos PRIME)					
Inicializar a estação de trabalho					
Iniciais do operador					

Assinatura do Supervisor _____

Registo de Manutenção Mensal do Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Ano: _____

N.º de série: _____

Manutenção Mensal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lavar os tubos (linhas) com solução de lavagem 4,5% diluída numa relação 1+4												
Lavar os tubos ISE com solução de lavagem a 4,5%												
Imprimir os dados acumulados de QC teste por teste (ecrã principal – F8/F1/F5)												
Guardar a base de dados (ecrã principal – F8/F3/F3)												
Iniciais do operador												

Assinatura do Supervisor _____