

Jurnal de întreținere zilnică Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Luna: _____

Număr serial: _____

Întreținere zilnică	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Conectare utilizator																															
Verificați recipientul de apă deionizată																															
Verificați recipientul de apă uzată																															
Verificați compartimentul pentru cuvete uzate																															
Adăugați cuvete în încărcător																															
Verificați punga de soluție ISE Cal1																															
Verificați starea reactivilor																															
Efectuați operațiunea de pornire (Ecran principal – Pornire F1)																															
Intrați în regimul de așteptare (Ecran principal – Regim de așteptare F2)																															
Ștergeți fișierele zilnice (Ecran principal – F8/F3/F7)																															
Scoateți segmentele (Ecran principal - Disc probe- F5)																															
Scoateți recipientele Cal/QC																															
Curățați acele/Paletele de amestecare F8/F2/F8/F4																															
Curățați godeurile de spălare																															
Verificați poziția acelor/ amestecătoarelor F8/F2/F5																															
Curățați suprafețele (cu un șervețel umed)																															
Deconectare																															
Inițialele operatorului																															

Semnătura supervisorului _____

Jurnal de întreținere săptămânală Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Luna: _____

Număr serial: _____

Întreținere săptămânală	Săptămâna 1	Săptămâna 2	Săptămâna 3	Săptămâna 4	Săptămâna 5
Spălați recipientele de apă deionizată și apă uzată					
Verificați soluția cu electrod de referință					
Curățați segmentele pentru probe					
Curățați discul de probe/discul de reactivi					
Ștergeți apa condensată de sub discul de reactivi (toate modelele) și de sub discul de probe (modelele PRIME)					
Boot-ați stația de lucru					
Inițialele operatorului					

Semnătura supervisorului _____

Jurnal de întreținere lunară Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Anul: _____

Număr serial: _____

Întreținere lunară	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spălați eprubetele (liniile) cu soluție de spălare 4,5% diluată 1+4												
Spălați eprubetele ISE cu soluție de spălare 4,5%												
Tipăriți cumulativele de control al calității, analiză cu analiză (Ecran principal – F8/F1/F5)												
Salvați baza de date (Ecran principal – F8/F3/F3)												
Inițialele operatorului												

Semnătura supervisorului _____