

Ведомость ежедневного технического обслуживания анализаторов Konelab 20, 20XT, PRIME 30 & 60

Месяц: _____

Серийный номер: _____

Ежедневное техобслуживание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Вход в систему																															
Проверить канистру деионизированной воды																															
Проверить канистру для жидких отходов																															
Проверить отсек для использованных кювет																															
Добавить кюветы в загрузчик																															
Проверить мешочек с ISE Ca1																															
Проверить состояние реактивов																															
Выполнить функцию «Startup» (Запуск) (Основное окно-F1-Startup)																															
Выполнить функцию «Standby» (Ожидание) (Основное окно-F2-Standby)																															
Очистка ежедневных файлов (Основное окно – F8/F3/F7)																															
Извлечь сегменты (Основное окно – Sample disk- F5)																															
Извлечь кюветы калибровочных/ контрольных образцов																															
Очистить иглы/лопасть (лопасти) F8/F2/F8/F4																															
Очистить гнезда промывки																															
Проверить положение иглы/мешалки F8/F2/F5																															
Очистить поверхности (влажной тканью)																															
Выход из системы																															
Инициалы оператора																															

Подпись контролера _____

**Ведомость еженедельного технического обслуживания анализаторов Konelab 20, 20XT, PRIME 30,
PRIME 60**

Месяц: _____

Серийный номер: _____

Еженедельное техобслуживание	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 5
Промыть канистры для деионизированной воды и жидких отходов					
Проверить раствор электрода сравнения					
Очистить сегменты образцов					
Очистить карусель образцов/реактивов					
Вытереть водяной конденсат под каруселью реактивов (все модели) и под каруселью образцов (модели PRIME)					
Перезагрузить рабочую станцию					
Инициалы оператора					

Подпись контролера _____

**Ведомость ежемесячного технического обслуживания анализаторов Konelab 20, 20XT, PRIME 30,
PRIME 60**

Год: _____

Серийный номер: _____

Ежемесячное техобслуживание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промыть пробирки (линии) промывающим раствором 4,5%, разведенным в отношении 1+4												
Промыть трубки ИСЭ промывающим раствором 4,5%												
Распечатать совокупные данные КК по каждому исследованию (Основное окно – F8/F1/F5)												
Сохранить базу данных (Основное окно – F8/F3/F3)												
Инициалы оператора												

Подпись контролера _____