

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Denný záznam údržby

Mesiac: _____

Séria #: _____

Denná údržba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Prihlasovacie meno (login) užívateľa																															
Kontrola nádoby na deionizovanú vodu																															
Kontrola nádoby na odpadovú vodu																															
Kontrola komory na použité kvety																															
Pridať kvety do zásobníka																															
Kontrola vrečka ISE Cal1																															
Kontrola stavu čidla																															
Spustenie (Hlavná obrazovka – F1-Spustenie)																															
Standby (Pohotovostný režim) (Hlavná obrazovka – F2-Standby (Pohotovostný režim))																															
Vyčistenie denných súborov (Hlavná obrazovka – F8/F3/F7)																															
Odstránenie segmentov (Hlavná obrazovka- Disk so vzorkami- F5)																															
R Odstránenie kal./misiiek kontroly kvality (QC)																															
Čistenie Ihly/Lopatky (lopatiek) na miešanie F8/F2/F8/F4																															
Čistenie šácht na umývanie																															
Kontrola polohy ihly/miešadla F8/F2/F5																															
Čistenie povrchov (s vlhkou tkaninou)																															
Odhlásenie																															
Iniciály (parafa) obsluhy																															

Podpis kontrolóra _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Týždenný záznam údržby

Mesiac: _____

Séria #: _____

Týždenná údržba	Týždeň 1	Týždeň 2	Týždeň 3	Týždeň 4	Týždeň 5
Vypláchnutie nádob na deionizovanú a odpadovú vodu					
Kontrola roztoku referenčnej elektródy					
Vyčistenie segmentov vzoriek					
Vyčistenie disku vzorky/čínidla					
Poutieranie kondenzovanej vody pod diskom čínidla (všetky modely) a pod diskom na vzorky (modely PRIME)					
Spustenie pracovnej stanice					
Iniciály (parafa) obsluhy					

Podpis kontrolóra _____

Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Mesačný záznam údržby

Rok: _____

Séria #: _____

Mesačná údržba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umytie trubiek (potrubí) 4,5 % zriedeným roztokom 1+4												
Umytie ISE trubiek oplachovacím 4.5% roztokom												
Vytlačenie súhrnného testu kontroly kvality (QC) podľa testu (Hlavná obrazovka – F8/F1/F5)												
Uloženie databázy (Hlavná obrazovka – F8/F3/F3)												
Iniciály (parafa) obsluhy												

Podpis kontrolóra _____