

## Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Protokoll för dagligt underhåll

Månad: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

Dagligt underhåll	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Användarinloggning																																
Kontrollera behållaren för avjoniserat vatten																																
Kontrollera behållaren för avloppsvatten																																
Kontrollera avfallsfacket för kyvetter																																
Fyll på kyvetter i inmataren																																
Kontrollera ISE Cal1-påsen																																
Kontrollera reagensmedlets status																																
Starta upp (Huvudskärm – F1-Uppstart)																																
Försätt i standby (Huvudskärm – F2-Standby)																																
Radera dagliga filer (Huvudskärm – F8/F3/F7)																																
Ta bort segment (Huvudskärm-provdisk-F5)																																
Ta bort Cal/QC-skålar																																
Rengör nålar/blandarspatlar F8/F2/F8/F4																																
Rengör tvättbrunnarna																																
Kontrollera nål-/mixerposition F8/F2/F5																																
Rengör ytorna (med en våt trasa)																																
Logga ut																																
<b>Operatörens initialer</b>																																

Förmannens underskrift \_\_\_\_\_

**Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Protokoll för veckovis underhåll**

Månad: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

<b>Veckovis underhåll</b>	<b>Vecka 1</b>	<b>Vecka 2</b>	<b>Vecka 3</b>	<b>Vecka 4</b>	<b>Vecka 5</b>
Tvätta behållaren för avjoniserat vatten och avloppsvatten					
Kontrollera referenselektrodlösningen					
Rengör provsegmenten					
Rengör prov-/reagensdisk					
Torka av kondenserat vatten under reagensdisken (alla modeller) och under provdisken (PRIME-modellerna)					
Starta arbetsstationen					
<b>Operatörens initialer</b>					

Förmannens underskrift \_\_\_\_\_

## Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60 Protokoll för månatligt underhåll

År: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

<b>Månatligt underhåll</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Tvätta rören (ledningarna) med utspädd 1+4 tvättlösning 4,5 %												
Tvätta ISE-rörledningarna med tvättlösning 4,5 %												
Skriv ut QC-ackumulationer test för test (Huvudskärm – F8/F1/F5)												
Spara databasen (Huvudskärm – F8/F3/F3)												
<b>Operatörens initialer</b>												

Förmannens underskrift \_\_\_\_\_